



NNGYK

Mikrobiológiai Referencia  
Laboratóriumi Főosztály

Minőségirányítási Eljárások

Emr172-03-M15

**Emr172-03-M15**

**Baktériumtörzsek és egyéb izolált minták beküldése**

Változat: 1

Fejezet oldal: 1/4

Azonosító

Emr172-03-M15-(1)-20240601

Izolátum/törzs, egyéb minta megnevezése	Szállításra vonatkozó		
	biztonsági szabályok	ajánlott hőmérséklet	használható táptalajok, transzport közegek
A felsorolásban nem szereplő törzsek esetén lépjen kapcsolatba a laboratóriummal!	A csomagolásra, szállításra vonatkozó előírásokat ld. <b>Útmutató biológiai anyagok csomagolására és szállítására (Emr172-04)</b>		
<i>Clostridioides difficile</i>	„B” kategóriájú fertőző mintára vonatkozó csomagolás (IATA P650)	szobahőn	Anaerob CM Holman folyékony táptalaj
<i>Salmonella</i> sp.	„B” kategóriájú fertőző mintára vonatkozó csomagolás (IATA P650)	szobahőn	Transzport táptalaj / Ferde agar / Törzsagar / Véres agar / Müller-Hinton agarlemez (esetleg Russel agarcső)
<i>Yersinia</i> spp. (elsősorban <i>Y. enterocolitica</i> és <i>Y. pseudotuberculosis</i> )	„B” kategóriájú fertőző mintára vonatkozó csomagolás (IATA P650)	szobahőn	Transzport táptalaj / Ferde agar / Véres agar; esetleg Eozin- metilénkék agar / Dezoxikolat-citrát agarlemez
<i>Campylobacter</i> spp.	„B” kategóriájú fertőző mintára vonatkozó csomagolás (IATA P650)	fagyasztva	Speciális transzportfolyadék
<i>Escherichia</i> sp. *kivéve:	„B” kategóriájú fertőző mintára vonatkozó csomagolás (IATA P650)	szobahőn	Ferde agar/ McConkey agar/ Véres agar / Eozin metilénkék agar
<i>Escherichia coli</i> , Shiga-szerű toxint termelő (az eredeti minta is küldendő!)	„A” kategóriájú fertőző mintára vonatkozó három rétegű csomagolás (IATA P620)	szobahőn	Gyanú esetén a törzs beküldendő az izoláláshoz használt táptalajon. Az átoltság kerülendő! Az eredeti mintát is kérjük beküldeni!
<i>Shigella</i> spp. *kivéve:	„B” kategóriájú fertőző mintára vonatkozó csomagolás (IATA P650)	szobahőn	Izolátum/törzs esetén: Transzport táptalaj / Ferde agar / Törzsagar / Véres agar / Müller-Hinton agarlemez; klinikai minta esetén: a mintához Pufferolt glicerines tartósító oldat keverése
<i>Shigella dysenteriae</i> 1	„A” kategóriájú fertőző mintára vonatkozó három rétegű csomagolás (IATA P620)	szobahőn	Gyanú esetén a törzs beküldendő az izoláláshoz használt táptalajon. Az átoltság kerülendő! Az eredeti a mintához „Pufferolt glicerines tartósító oldat” keverése
<i>Vibrio</i> spp.	„B” kategóriájú fertőző mintára vonatkozó csomagolás (IATA P650)	szobahőn	Izolátum/törzs esetén (halofilitást figyelembe véve): Transzport táptalaj / Ferde agar / Törzsagar / Véres agar / Müller-Hinton / Sós véres agarlemez; klinikai minta: a mintához szükség esetén „Konyhasós tartósító oldat” keverése



NNGYK

Mikrobiológiai Referencia  
Laboratórium Főosztály

Minőségirányítási Eljárások

Emr172-03-M15

**Emr172-03-M15**

**Baktériumtörzsek és egyéb izolált minták beküldése**

Változat: 1

Fejezet oldal: 2/4

Azonosító  
Emr172-03-M15-(1)-20240601

Izolátum/törzs, egyéb minta megnevezése	Szállításra vonatkozó		
	biztonsági szabályok	ajánlott hőmérséklet	használható táptalajok, transzport közegek
A felsorolásban nem szereplő törzsek esetén lépjen kapcsolatba a laboratóriummal!	A csomagolásra, szállításra vonatkozó előírásokat ld. Útmutató biológiai anyagok csomagolására és szállítására (Emr172-04)		
<i>Bacillus anthracis</i>	„A” kategóriájú fertőző mintára vonatkozó három rétegű csomagolás (IATA P620)	szobahőn	Gyanú esetén a törzs beküldendő az izoláláshoz használt táptalajon. Az átvétel kerülendő! Az eredeti mintát is kérjük beküldeni!
<i>Bacillus cereus</i> bv. <i>anthracis</i>	„A” kategóriájú fertőző mintára vonatkozó három rétegű csomagolás (IATA P620)	szobahőn	Gyanú esetén a törzs beküldendő az izoláláshoz használt táptalajon. Az átvétel kerülendő! Az eredeti mintát is kérjük beküldeni!
<i>Yersinia pestis</i>	„A” kategóriájú fertőző mintára vonatkozó három rétegű csomagolás (IATA P620)	szobahőn	Gyanú esetén a törzs beküldendő az izoláláshoz használt táptalajon. Az átvétel kerülendő! Az eredeti mintát is kérjük beküldeni!
<i>Brucella melitensis</i> , <i>B. abortus</i> , <i>B. suis</i>	„A” kategóriájú fertőző mintára vonatkozó három rétegű csomagolás (IATA P620)	szobahőn	Gyanú esetén a törzs beküldendő az izoláláshoz használt táptalajon. Az átvétel kerülendő! Az eredeti mintát is kérjük beküldeni!
Egyéb <i>Brucella</i> sp.	„A” kategóriájú fertőző mintára vonatkozó három rétegű csomagolás (IATA P620)	szobahőn	Gyanú esetén a törzs beküldendő az izoláláshoz használt táptalajon. Az átvétel kerülendő! Az eredeti mintát is kérjük beküldeni!
<i>Burkholderia pseudomallei</i> komplex	„A” kategóriájú fertőző mintára vonatkozó három rétegű csomagolás (IATA P620)	szobahőn	Gyanú esetén a törzs beküldendő az izoláláshoz használt táptalajon. Az átvétel kerülendő! Az eredeti mintát is kérjük beküldeni!
<i>Burkholderia cepacia</i> komplex	„A” kategóriájú fertőző mintára vonatkozó három rétegű csomagolás (IATA P620)	szobahőn	Gyanú esetén a törzs beküldendő az izoláláshoz használt táptalajon. Az átvétel kerülendő! Az eredeti mintát is kérjük beküldeni!
<i>Francisella tularensis</i>	„A” kategóriájú fertőző mintára vonatkozó három rétegű csomagolás (IATA P620)	szobahőn	Gyanú esetén a törzs beküldendő az izoláláshoz használt táptalajon. Az átvétel kerülendő! Az eredeti mintát is kérjük beküldeni!
<i>Rickettsia</i> spp.	„A” kategóriájú fertőző mintára vonatkozó három rétegű csomagolás (IATA P620)	fagyasztva	Gyanú esetén a törzs beküldendő az izoláláshoz használt táptalajon. Az átvétel kerülendő! Az eredeti mintát is kérjük beküldeni!

**NNGYK**Mikrobiológiai Referencia  
Laboratóriumi Főosztály

Minőségirányítási Eljárások

Emr172-03-M15

**Emr172-03-M15****Baktériumtörzsek és egyéb izolált minták beküldése**

Változat: 1

Fejezet oldal: 3/4

Azonosító  
Emr172-03-M15-(1)-20240601

Izolátum/törzs, egyéb minta megnevezése	Szállításra vonatkozó		
	biztonsági szabályok	ajánlott hőmérséklet	használható táptalajok, transzport közegek
A felsorolásban nem szereplő törzsek esetén lépjen kapcsolatba a laboratóriummal!	A csomagolásra, szállításra vonatkozó előírásokat ld. <b>Útmutató biológiai anyagok csomagolására és szállítására (Emr172-04)</b>		
<i>Orientia</i> spp.	„A” kategóriájú fertőző mintára vonatkozó három rétegű csomagolás (IATA P620)	fagyasztva	Gyanú esetén a törzs beküldendő az izoláláshoz használt táptalajon. Az átvétel kerülendő! Az eredeti mintát is kérjük beküldeni!
<i>Coxiella burnettii</i>	„A” kategóriájú fertőző mintára vonatkozó három rétegű csomagolás (IATA P620)	fagyasztva	Gyanú esetén a törzs beküldendő az izoláláshoz használt táptalajon. Az átvétel kerülendő! Az eredeti mintát is kérjük beküldeni!
<i>Chlamydia psittacii</i>	„A” kategóriájú fertőző mintára vonatkozó három rétegű csomagolás (IATA P620)	fagyasztva	Gyanú esetén a törzs beküldendő az izoláláshoz használt táptalajon. Az átvétel kerülendő! Az eredeti mintát is kérjük beküldeni!
<i>Coccidioides immitis</i> * gomba	„A” kategóriájú fertőző mintára vonatkozó három rétegű csomagolás (IATA P620)	szobahőn	Gyanú esetén a törzs beküldendő az izoláláshoz használt táptalajon. Az átvétel kerülendő! Az eredeti mintát is kérjük beküldeni!!
<i>Candida auris</i>	„B” kategóriájú fertőző mintára vonatkozó csomagolás (IATA P650)	szobahőn	Sabouraud táptalajon
<i>Staphylococcus enterotoxin B</i> termelő	„A” kategóriájú fertőző mintára vonatkozó három rétegű csomagolás (IATA P620)	szobahőn	Gyanú esetén a törzs beküldendő az izoláláshoz használt táptalajon. Az átvétel kerülendő! Az eredeti mintát is kérjük beküldeni! (klinikai minta esetén a mintához „Konyhasós tartósító oldal” keverése)
<i>Clostridium perfringens</i> epsilon toxin termelő	„B” kategóriájú fertőző mintára vonatkozó csomagolás (IATA P650)	szobahőn	Stuart transzport / Anaerob CM Holman folyékony táptalaj
<i>Bordetella pertussis</i>	„B” kategóriájú fertőző mintára vonatkozó csomagolás (IATA P650)	szobahőn	Transzport táptalajon
<i>Listeria monocytogenes</i>	B” kategóriájú fertőző mintára vonatkozó csomagolás (IATA P650)	szobahőn	Stuart transzport / Véres agar
<i>Corynebacterium diphtheriae</i>	B” kategóriájú fertőző mintára vonatkozó csomagolás (IATA P650)	szobahőn	Véres agar / Clauberg agar / Transzport táptalaj klinikai minta vagy nukleinsav esetén fagyasztva (szárzójegen)

**NNGYK**Mikrobiológiai Referencia  
Laboratóriumi Főosztály

Minőségirányítási Eljárások

Emr172-03-M15

**Emr172-03-M15****Baktériumtörzsek és egyéb izolált minták beküldése**

Változat: 1

Fejezet oldal: 4/4

Azonosító  
Emr172-03-M15-(1)-20240601

Izolátum/törzs, egyéb minta megnevezése	Szállításra vonatkozó		
	biztonsági szabályok	ajánlott hőmérséklet	használható táptalajok, transzport közegek
A felsorolásban nem szereplő törzsek esetén lépjen kapcsolatba a laboratóriummal!	A csomagolásra, szállításra vonatkozó előírásokat ld. <b>Útmutató biológiai anyagok csomagolására és szállítására (Emr172-04)</b>		
<i>Streptococcus pyogenes</i>	B" kategóriájú fertőző mintára vonatkozó csomagolás (IATA P650)	szobahőn	Stuart transzport / Véres agar
<i>Streptococcus agalactiae</i>	B" kategóriájú fertőző mintára vonatkozó csomagolás (IATA P650)	szobahőn	Stuart transzport / Véres agar
Multirezisztens (Gram+ és Gram-) baktériumok	B" kategóriájú fertőző mintára vonatkozó csomagolás (IATA P650)	szobahőn	Törzs agar / Stuart transzport / Véres agar / Mueller-Hinton agar
<i>Neisseria meningitidis</i>	B" kategóriájú fertőző mintára vonatkozó csomagolás (IATA P650)	szobahőn	Véres agar/ Csokoládé agar, Transzport táptalaj klinikai minta vagy nukleinsav esetén fagyasztva (szárzójégen)
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	B" kategóriájú fertőző mintára vonatkozó csomagolás (IATA P650)	szobahőn	Véres agar, Transzport táptalaj klinikai minta vagy nukleinsav esetén fagyasztva (szárzójégen)
<i>Haemophilus influenzae</i>	B" kategóriájú fertőző mintára vonatkozó csomagolás (IATA P650)	szobahőn	Csokoládé agar, Transzport táptalaj klinikai minta vagy nukleinsav esetén fagyasztva (szárzójégen)
egyéb, izolátumból kivont nukleinsav	-	fagyasztva, szárzójégen	-